



## Medicazione Dentale HemCon®



### La tecnologia sviluppata durante le situazioni di emergenza applicata alla cura delle ferite del cavo orale.

#### **Sigilla rapidamente il letto della ferita**

- Emostatica, arresta l'emorragia.
- Uno studio indipendente<sup>1</sup> ha riportato che l'emostasi si verifica in meno di un minuto, in confronto ai 9,53 minuti richiesti dalle altre garze.
- Stabilizza il coagulo ematico richiamando gli eritrociti.

#### **Risparmio di tempo e denaro**

- Auto-adesiva. Non richiede alcuna sutura, riducendo il tempo di trattamento.\*
- In genere si dissolve in 48 ore, ma potrebbe richiedere fino a sette giorni (non è necessario rimuoverla).

#### **Allevia il dolore**

- Protegge il letto della ferita, alleviando il dolore.
- Crea una barriera fisica che protegge la ferita dall'irritazione.



» Sito post-estrattivo sulla cresta alveolare



» Sito della ferita dopo tre settimane.

Clinical photos  
©2009 Dr. Rene Smit.

\*Per procedure parodontali, fissare con medicazioni parodontali

## Medicazioni Dentale HemCon – un progresso significativo nelle estrazioni dentali e nella cura delle ferite del cavo orale.

Dai produttori delle rivoluzionarie Fasciature HemCon, utilizzate dalle Forze Armate americane e dai medici civili in tutto il mondo.



» Prima dell'applicazione.

» Dopo l'applicazione della medicazione Dentale HemCon

» Prima dell'applicazione

» Dopo l'applicazione della medicazione Dentale HemCon

### Passaggi per l'uso

1. La medicazione Dentale HemCon può essere ritagliata per adattarsi a qualsiasi ferita sanguinante del cavo orale. Utilizzare la minima quantità di garza richiesta per ottenere la stabilizzazione della ferita.
2. Lasciare in superficie una piccola quantità di sangue. È richiesta per facilitare il particolare processo di adesione.
3. Collocare la garza sul sito della ferita con uno strumento asciutto. Non stipare eccessivamente il sito.
4. Applicare una pressione diretta sulla Medicazione fino a che non aderisca e si ottenga la stabilizzazione della ferita.\*
5. Prima di dimettere il paziente, esaminare visivamente il sito per confermare che la medicazione sia posizionata correttamente.
6. Di solito la medicazione si dissolve entro 48 ore, ma può richiedere fino a sette giorni. Se necessario, rimuovere il materiale residuo mediante irrigazione.

\*Malmquist JP, Clemens SC, Oien HJ, Wilson SL. Hemostasis of Oral Surgery Wounds with HemCon Dental Dressing. Journal of Maxillofacial Surg. 2008;66:1177-1183

### Vantaggi clinici della Medicazione Dentale HemCon

- Non contiene proteine umane, bovine, o suine o fattori della coagulazione.
- E' composta da chitosano, un polisaccaride naturale biocompatibile derivato dall'esoscheletro del gambero.
- Auto-adesiva, non richiede alcuna sutura
- Attrae gli eritrociti e non assorbe il sangue

### In quali casi i clinici utilizzano la Medicazione Dentale HemCon

- ✓ Estrazioni
- ✓ Sito donatore per innesto gengivale libero
- ✓ Biopsie
- ✓ Ferite dei tessuti molli

### Procedure di innesto gengivale palatale

#### Collocamento della garza HemCon e post-operatorio



Fig. 1 Al momento dell'intervento: Medicazione HemCon.



Fig. 2 Guarigione dopo una settimana

#### Controllo del sito donatore e post-operatorio



Fig. 1 Al momento dell'intervento: nessuna medicazione dentale.



Fig. 2 Guarigione dopo una settimana.

Clinical photos ©2009 Dr. Hal Oien. Tutti i diritti riservati. I singoli risultati possono variare.

### Informazioni per gli ordini

Cat.	Numero	Descrizione	Dimensione
HC204	EU	Medicazione HemCon, Box di 12, Confez. con singola-unità	10×12 mm
HC205	EU	Medicazione HemCon, Box di 12, Confez. con quattro-unità	10×12 mm
HC217	EU	Medicazione HemCon, Box di 12, Confez. con singola-unità	25×75 mm

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitateci online all'indirizzo [www.zimmerdental.com](http://www.zimmerdental.com) o per parlare con un nostro rappresentante, chiamate il numero 0039 0438 555573 - ZIMMER DENTAL ITALY

Per ricevere il nostro eNews visitateci all'indirizzo: [http://www.zimmerdental.com/news\\_eNewsLetterSignUp.aspx](http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx)

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sui nostri programmi educativi, contattateci:

Negli U.S.A: 1 (800) 854-7019

Per ordini via fax 1 (888) 225-2483

Negli U.S.A: +1 (760) 929-4300

Australia +61 (0)2 9950 5434 o 1 (800) 241 916

Canada +1 (905) 567-2073 o 1 (800) 265-0968

Francia +33 (0)1 45 12 35 35

Germania +49 (0)761 1 56/47 0

Israele +972 (0)3 6124242

Italia +39 043 855 5573

Spagna +34 93 846 05 43



Zimmer Dental Italy

Via Matteotti, 98

31029 Vittorio Veneto

Italia

[www.zimmerdental.com](http://www.zimmerdental.com)