



Puros[®], Blocchi per Alloinnesti



Rivoluzionare il concetto di innesto a blocco

Gli Alloinnesti a blocco *Puros* rappresentano la soluzione rapida ed efficace per ottenere risultati predicibili nell'aumento osseo. L'Alloinnesto a blocco *Puros*, è sterilizzato e preservato utilizzando il processo brevettato *Tutoplast*[®] e rappresenta la scelta d'elezione per ottenere una rigenerazione ossea.

- Esso elimina la necessità di eseguire un secondo intervento chirurgico per prelevare un blocco di tessuto osseo autologo, e quindi consente di risparmiare tempo, di ridurre il dolore e le complicanze e di abbreviare il periodo di riabilitazione del paziente.
- Conserva la struttura minerale e la matrice di collagene naturale del tessuto osseo umano.
- Si rigenera e si rimodella in osso vitale e vascolarizzato.
- Consente una facile manipolazione, una rapida reidratazione.
- Lunga conservazione del prodotto per cinque anni.



Blocco di osso cortico-spongioso *Puros*



Particolato di osso corticale *Puros*



Particolato di osso spongioso *Puros*

Famiglia di Prodotti per Alloinnesti Puros


Una linea completa di prodotti da utilizzare insieme o separatamente per ogni tipo di innesto osseo.




Puros, Blocco per Alloinnesto

L'esclusivo Processo Tutoplast®


La famiglia di prodotti per Allo innesto *Puros* è trattata utilizzando il processo brevettato *Tutoplast*®. Questo processo rimuove delicatamente i materiali indesiderati, come i grassi, le cellule, gli antigeni e inattivi i patogeni, ma preserva la matrice di collagene naturale e i minerali.

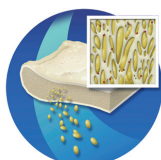


1. Delipidazione

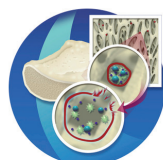


2. Trattamento osmotico

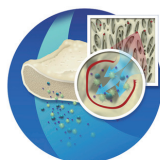

3. Trattamento ossidante

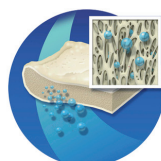


4. Disidratazione con solvente

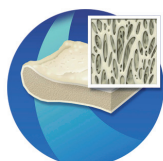

5. Irradiazione con dosi limitate di raggi gamma

Vantaggi clinici degli Alloinnesti Puros¹

- Gli studi effettuati dimostrano che i risultati clinici sono paragonabili a quelli ottenuti con gli innesti autologhi a blocco.
- Sono in grado di stabilizzare gli impianti dopo 5 mesi.
- Offrono i vantaggi combinati dell'osso corticale e spongioso nell'aumentare il volume della cresta ossea.
- Il Processo *Tutoplast*® è stato utilizzato da oltre 25 anni, in più di 500.000 casi, senza che sia stato segnalato alcun caso di trasmissione della malattia.

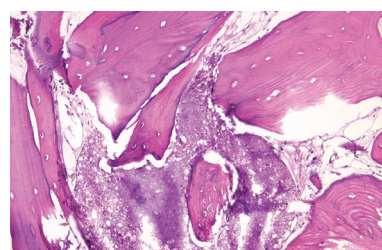

La rapida incorporazione dell'Alloinnesto a Blocco Puros è stata istologicamente dimostrata (6 mesi, 200x, colorazione con ematosilina – eosina).

Osservate più da vicino

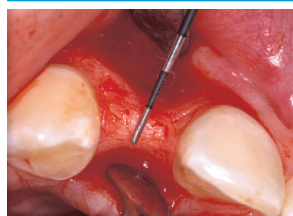


Figura A

Prima dell'intervento: cresta alveolare severamente riassorbita.

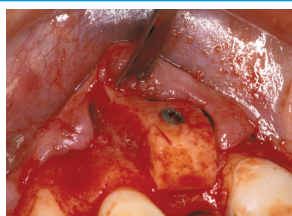


Figura B

Posizionamento del Blocco Puros



Figura C

Dopo l'intervento: Blocco Puros per Alloinnesto incorporato nell'osso dopo la guarigione.



Figura D

Cresta alveolare riabilitata con restauro su impianto.

Fotografie gentilmente offerte da J. Daulton Keith, Jr., DDS, FICD. Immagini istologiche gentilmente offerte da Karl J. Zeren, DDS. I risultati nei singoli casi possono variare.

Informazioni per gli ordini*

Numero di Catalogo	Descrizione
67220	<i>Puros</i> , Blocco per Alloinnesto, 10mm
67221	<i>Puros</i> , Blocco per Alloinnesto, 15mm

*Richiedete la disponibilità locale del prodotto.

¹ Dati in archivio.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitateci online all'indirizzo www.zimmerdental.com o, per parlare con un rappresentante di vendita, chiamate il numero +39 043 855 5573.

Per ricevere il nostro eNews visitateci all'indirizzo http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, sui nostri programmi professionali e sui nostri programmi di Continuing Education, contattateci:

Zimmer Dental Italy
Via Matteotti, 98
31029 Vittorio Veneto (TV) – Italia
Telefono +39 043 855 5573
Fax +39 043 853181
www.zimmerdental.com

 **zimmer** | dental
Confidence in your hands